

Firma Handlowo Produkcyjna „Świat Dziecka”
Janusz Antoni Kowalski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMEDYK
Ul. Kielecka 76
26 - 600 Radom
Tel/fax: (48) 331-50-93
E-mail: biuro-promedyk@wp.pl



Instrukcja użytkowania

**Obuwie ortopedyczne wzór: 03W, 03AW, 03BW, 03ABW, 03LAW, 03SW, 03SAW, 03PW,
03PWG, 03/3W, 03/3AW**

03MW, 03AMW, 03BMW, 03ABMW, 03LMW, 03SMW, 03SAMW

Obuwie posiada atest wydany przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi i jest przeznaczone do użytku wewnętrznego, głównie w pomieszczeniach placówek służby zdrowia.

Zabezpiecza przed:

- Działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne.
- Środkami czystości o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania.
- Czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych.
- Słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia i zdrowia obszary ciała.
- Światłem słonecznym.

Konserwacja:

Zabrudzenia usuwamy używając miękkiej szczoteczki lub ściereczki bawełnianej z dodatkiem niewielkiej ilości wody z delikatnym detergentem np. mydłem.

Zaleca się natłuszczać wierzch obuwia pastą bezbarwną lub delikatnym kremem.

Obuwie przemoczone, zawilgotniałe, przepocone należy wysuszyć z dala od źródeł ciepła, najlepiej w przewiewnym miejscu w temp. ok. 20-25st.C. Po wyschnięciu obuwie należy wypełnić np. miękkim papierem, aby nie uległo zdeformowaniu.

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65%, zabezpieczone przed zamoczeniem zabrudzeniem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego, z dala od źródeł ciepła.

Nie należy:

- używać obuwia na powierzchniach żrących,
- użytkować w temperaturach minusowych,
- prać obuwia

P.W. PROMEDYK
Janusz Kowalski
26-600 Radom, ul. Kielecka 76
tel. 48 33 15 093
-670061646- NIP 948-202-32-56

Obuwie używane niezgodnie z przeznaczeniem, nie konserwowane nie podlega gwarancji.